



## COVERPLAST AG

Unionstrasse 14 · CH-9403 Goldach · Tel. +41 (0)71 841 68 64 · Fax +41 (0)71 841 70 75

# Hufleder kitt ZR



Für die Arbeiten mit **Hufleder kitt ZR** soll das Pferd auf einem gereinigten und harten Boden stehen (kein Naturboden).

Nach Reinigung des Hufes und Auskratzen des Spaltes zwischen Eisen und Huf wird der Hufleder kitt in ca. 70 - 75° warmem Wasser 3 - 5 Minuten eingeweicht, sodass eine weiche, kaugummiähnliche Masse entsteht (bei zu heissem Wasser wird der **Hufleder kitt ZR** klebrig). Diese Masse gut durchkneten.

Pro Huf wird ungefähr 1 Tafel (d.h. ca. 120-150 gr) **Hufleder kitt ZR** benötigt.



Die weiche Masse wird (eventuell mit feuchten oder eingefetteten Händen) auf die Hufsohle, unter das Eisen und speziell unter die Trachten des Eisens gedrückt.

Um eine optimale Haltbarkeit des Hufleder kittes zu erzielen, ist es wichtig, dass der Hufbeschlag verstärkt abgedacht ist und die Gebrauchsanweisung **genau** befolgt wird (**Wartezeit nach dem Einbringen unbedingt einhalten**).



Das Pferd muss nach Beendigung der Arbeit stehen bis der **Hufleder kitt ZR** erkaltet ist (ca. 20 Minuten).

**Hufleder kitt ZR** kann während einer ganzen Beschlagsperiode auf der Hufsohle belassen werden. Wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben, kann **Hufleder kitt ZR** problemlos mit dem Hufkratzer entfernt werden, um ihn bei Bedarf erneut zu verwenden, (**d.h. wieder erwärmen - kneten und einbringen**).

